

SURGICAL
GERÄTEABDECKUNGEN
SONDENABDECKUNGEN

Wireless Probe Covers

Die richtige Passform für eine schnellere und einfachere kabellose Bildgebung

Vielseitige Abdeckungen: Ideal für kabellose Ultraschallsonden

- Schnelle & einfache Schallkopfabdeckung
- Für die ADHESION Adhesive tip Variante ist kein Gel erforderlich
- Verkürzte Folie, ideal für kabellose Schallköpfe
- Multifunktionales Design, passt zu einer Vielzahl von Schallköpfen

Sauber und präzise:

- Verfügbar in zwei Varianten:
 - Sondenabdeckung (Standard) mit Gel
 - Sondenabdeckung (Adhesion) mit integrierter Haftfläche
- Minimierter Reinigungsaufwand
- Gewohnt einwandfreie Bildgebung

Anwendersicherheit und minimiertes Infektionsrisiko

- Integrierter Sicherungsmechanismus verhindert verrutschen während des Sondengebrauchs
- Einfache Anwendung durch Teleskop-Faltung
- Hergestellt aus EMA-Copolymer. Erfüllt aktuelle Anforderungen hinsichtlich physikalischem Virenschutz.

Hilft das 
Infektionsrisiko
zu minimieren

Hilft 
Kontaminationen
vorzubeugen

Hilft 
**Anwender und
Patienten** zu
schützen

Wireless Probe Covers



- ✓ **Kleberschluss**
Faltbarer Kleberschluss umschließt den Schallkopf vollumfassend
- ✓ **Teleskop-Faltung**
Ermöglicht eine einfache Platzierung der Abdeckung auf dem Schallkopf und ein einfaches Auftragen von Gel auf der Außenseite der Abdeckung
- ✓ **Sicherungsmechanismus**
Zusätzliche Fixierung durch beiliegende Gummiringe

Erste Schritte (Weitere Informationen: Siehe Gebrauchsanweisung):



① Sterile Abdeckung ist gebrauchsfertig. Suchen Sie den mittleren Falz/Pfeil-Indikator.



② Führen Sie eine Hand in die Abdeckung ein. Suchen Sie die Klebefolie.



③ Entfernen Sie die Klebeschutzfolie und klappen Sie den Deckel in die gewünschte Position.



④ Ziehen Sie die Abdeckung über den Schallkopf und verwenden Sie Gel nach Bedarf.



⑤ **Zum Entfernen:** Abdeckung abziehen und Schallkopf entfernen, Klebematerial löst sich rückstandsfrei, Nachreinigung durch Wischdesinfektion.

	Standard	ADHESION™ Adhesive tip
Steril:	WPC0612 15x30 cm 20/Karton	WAPC0612 15x30 cm 20/Karton
Unsteril:	WPC0612N 15x30 cm 100/Karton	WAPC0612N 15x30 cm 100/Karton

ECOLAB
HEALTHCARE
EUROPE
Richtstrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland
www.ecolab.com



MICROTEK MEDICAL, INC.
1 Ecolab Place
St. Paul, MN 55102 U.S.A.
www.microtekmed.com



Microtek Medical B.V.
Hekkehorst 24
7207 BN Zutphen
The Netherlands

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™